

Wichtige Informationen zu FFP2-Masken

Schutzwirkung:

FFP2-Masken (ohne Filter):

- Bieten Fremd- und Eigenschutz
- Ungeeignet für Bartträger, da die Maske nicht komplett abschließen kann

Tragezeitbegrenzung:

FFP2-Masken (ohne Filter):

- Maximale Tragezeit von 75 Minuten mit anschließender Erholungsdauer von 30 Minuten (5x täglich)
- Maximal an 4 Tagen in der Woche -

Wiederverwendbarkeit:

- FFP2-Masken (ohne Filter):
- Masken mit NR-Kennzeichnung sind nicht wiederverwendbar (Wechsel der Maske am nächsten Arbeitstag)
 - Masken mit R-Kennzeichnung sind wiederverwendbar

Entsorgung:

Die Masken können sorglos im Hausmüll entsorgt werden.

Richtige Verwendung

[Video: FFP2 - Die sachgemäße Anwendung laut DGUV](#)